





PERIPHERAL VASCULAR MECHANICAL
THROMBECTOMY CATHETER

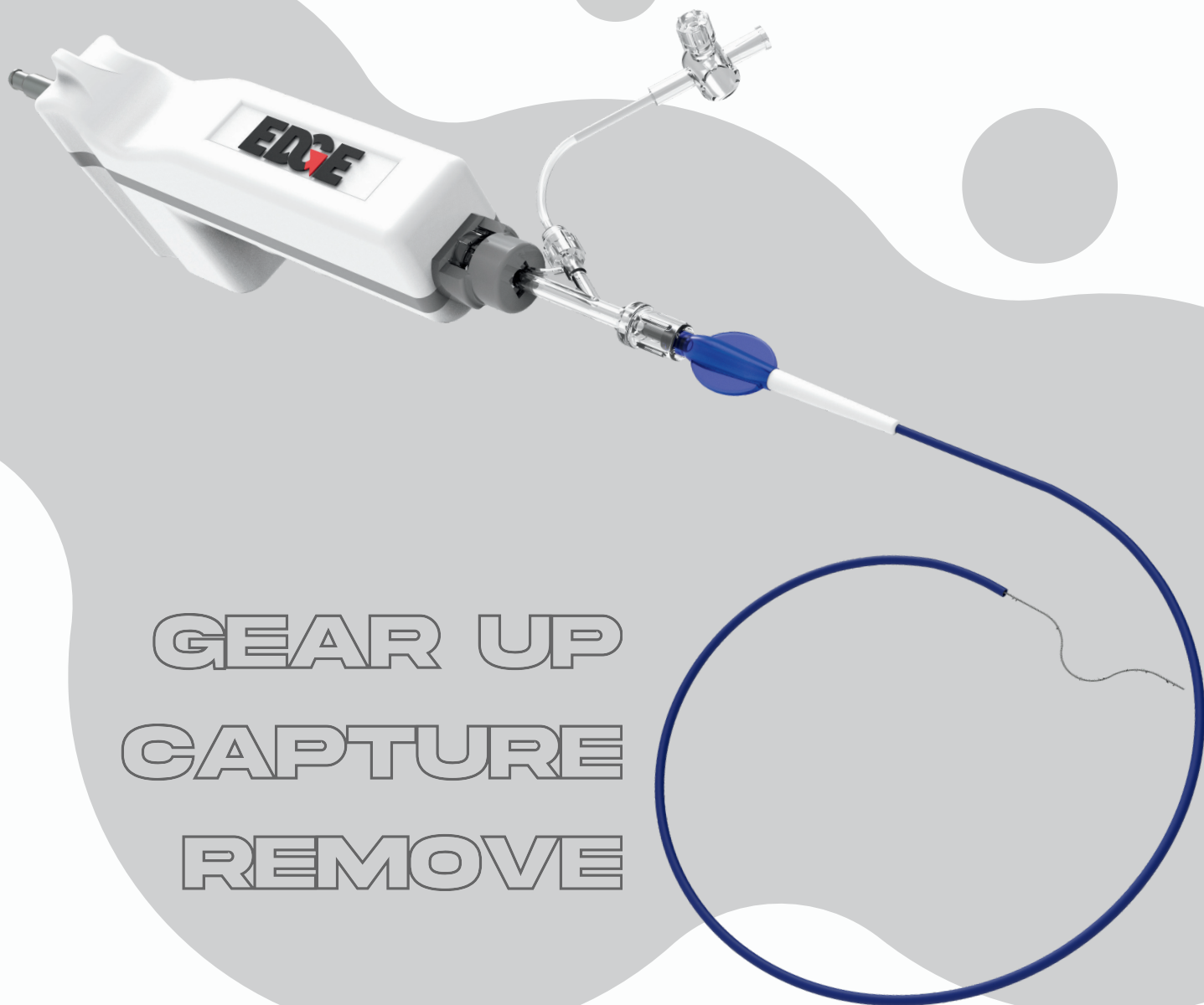

GEAR UP
CAPTURE
REMOVE

Edge™ Periferik Vasküler Mekanik Trombektomi Kateteri, akut semptomatik derin ven trombozunun, dönen bir tel ile mekanik olarak pıhtılaşmasını gidermek ve periferik vaskülatürde doktorun belirlediği sıvıların kontrollü ve seçici infüzyonu için tasarlanmıştır.

Kateter, el tipi bataryayla çalışan bir sürücü birimine bağlı önceden şekillendirilmiş bir teli içeren lümen tüpüdür ve sürücü ünitesi periferik vaskülatürdeki akut semptomatik derin ven trombozunda pıhtıyı mekanik olarak çözmek, çapaklarını gidermek ve parçalamak için teli 10.000 rpm / max'da çevresel olarak dönmesini tetikler. Atravmatik dönen tel mekanik olarak maserasyon yapmaz ve damar duvarına zarar vermeden pıhtıyı küçük parçacıklar halinde parçalar.

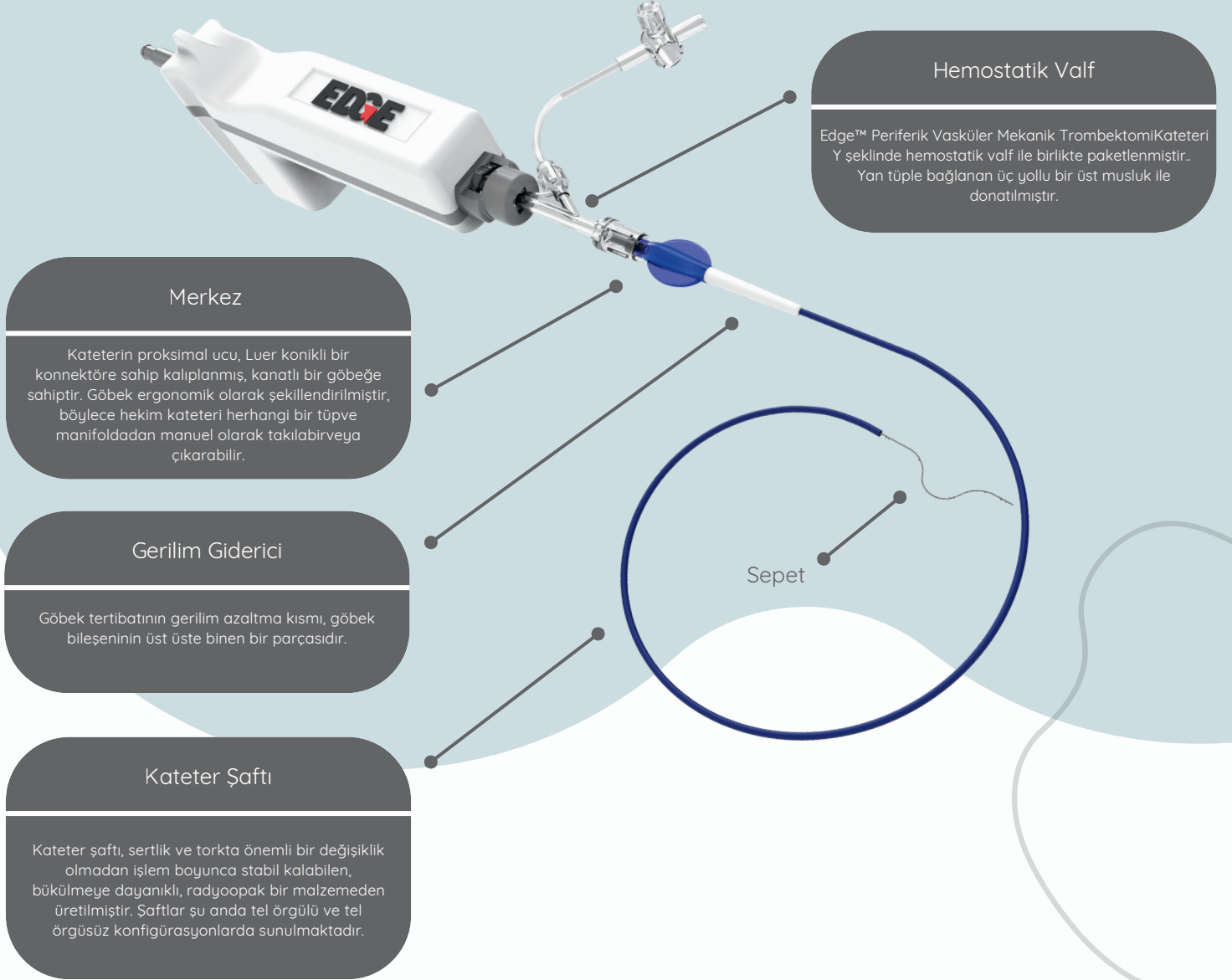

Akut semptomatik derin ven trombozunun mekanik olarak çözülmesi ve periferik damarlarda trombolitikler de dahil olmak üzere hekim tarafından belirlenen sıvıların kontrollü ve seçici infüzyonu için tasarlanmıştır.

Edge™ Periferik Vasküler Mekanik Trombektomi Kateteri, perkütan kateter tabanlı bir sistemdir (tek parçalı yapı). Tek kullanımlık, elde taşınabilir, pille çalışan içi boş şaft rotator tahrik ünitesi, yaklaşık 10.000 rpm hızla dönen bir dispersiyon teline bağlıdır.

Endikasyonlar


Akut semptomatik derin ven trombozunda pıhtıyı mekanik olarak parçalara ayırmak ve periferik vaskülatürde doktor tarafından belirlenen sıvıların kontrollü ve seçici infüzyonu için endikedir.

Kateter Ucu

Kateterin ucu, vasküler anatomilerine uyum sağlayacak şekilde düz ve kavisli şekillerde gelir. Uç malzemesi yumuşak bir yapıya sahiptir ve işlemin tüm aşamalarında damar duvarını sınırlamak için yuvarlatılmıştır.

Mevcut ölçüler

5/6/7/8/9 Fr x 65/90/110/135/165 cm

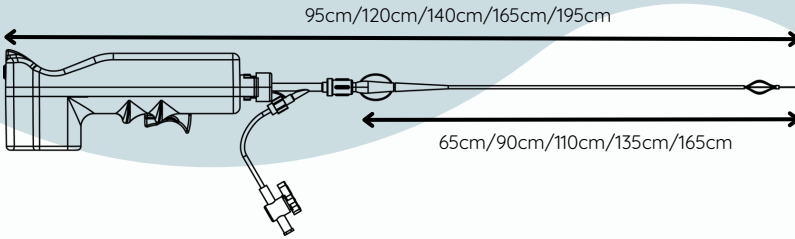

Kontrendikasyonlar

- Bu sistem, hekimin tıbbi değerlendirmesine göre, böyle bir işlemin hastanın durumunu tehlikeye atabileceği durumlarda kontrendikedir.
- Hastanın herhangi bir fiziksel rahatsızlığının bu cihazın kullanımına kontrendike olup olmadığını belirlemek hekimin sorumluluğundadır.
- Periferik damar genişlemesi amacıyla tasarlanmamıştır.
- Inferior vena kava filtresi gibi vasküler filtresi olmayan hastalarda.
- Bu sistem, kan veya kan ürünlerinin infüzyonu için tasarlanmamıştır.
- Lezyona kılavuz tel ile ulaşamayan hastalarda.
- Kesici/kesici balonlar, pediatrik, yenidoğan ve nörovasküler hastalarda kullanımı kontrendikedir.



GEAR UP
CAPTURE
REMOVE



Bir cerrah veya hekim, bir hastayı tedavi ederken hangi ürünü kullanacağına karar verirken yalnızca kendi mesleki tıbbi/klinik yargısına güvenmelidir. Maveria tıbbi tavsiye vermez ve cerrahların herhangi bir ürünü ameliyatta kullanmadan önce bu ürün konusunda eğitim almalarını savunur. Sunulan içerik, Maveria Medical ürün seçeneklerinin genişliğini belirlemeyi amaçlamaktadır. Bir cerrah/hekim, herhangi bir Maveria Medical ürününü kullanmadan önce daima prospektüsüne, ürün etiketine ve/veya kullanım talimatlarına başvurmalıdır. Ürünler, yerel düzenleyici ve/veya tıbbi uygulamalar nedeniyle her zaman tüm pazarlarda benzer kapasitede mevcut olmayabilir. Maveria Medical ürünleri hakkında sorularınız varsa bir Maveria Medical temsilcisiyle iletişime geçmeniz önerilir.

Maveria Medical Inc., ürünlerinin EN ISO 13485 sertifikalı kalite yönetimi uygulanarak, mümkün olan tüm özen gösterilerek, en uygun son teknoloji süreçler kullanılarak ve tasarım ve üretimine güvenliği entegre etme ilkesi göz önünde bulundurularak tasarlandığını, üretildiğini ve paketlenildiğini garanti eder. Bu sistem, kullanım kılavuzunda ve/veya kullanım talimatlarında açıklanan önlemlere uygun olarak, amaçlandığı koşullar ve amaçlar doğrultusunda kullanıldığında cihazın güvenli kullanımını garanti altına almak ve cihazın kullanımıyla ilişkili riskleri mümkün olduğunca en aza indirmek (tamamen ortadan kaldırılamasa da) için tasarlanmıştır. Cihaz, yalnızca uzman sağlık personelinin sorumluluğunda, tasarlandığı tedavinin kaçınılmaz riskleri, olası yan etkileri ve komplikasyonları ve bu kullanım talimatlarının diğer bölümlerinde belirtilenler de dikkate alınarak kullanılmalıdır.

ABD ve yabancı patentler bekleniyor
Tarih Aralık 2020 Telif Hakkı © 2020.
Tüm hakları saklıdır.
Maveria Medical Devices Inc.

EDG1220-EN-REV01 Printed in TÜRKİYE



2803

Maveria Medical Devices Inc.

Yesilbayır Mahallesi Sagduyu Caddesi 107/C
Mamak/ Ankara-Türkiye

+90 312 341 50 27

+90 312 341 50 26

www.maveramedical.com.tr