


SIDEREAL™

PERIPHERAL VASCULAR SNARE

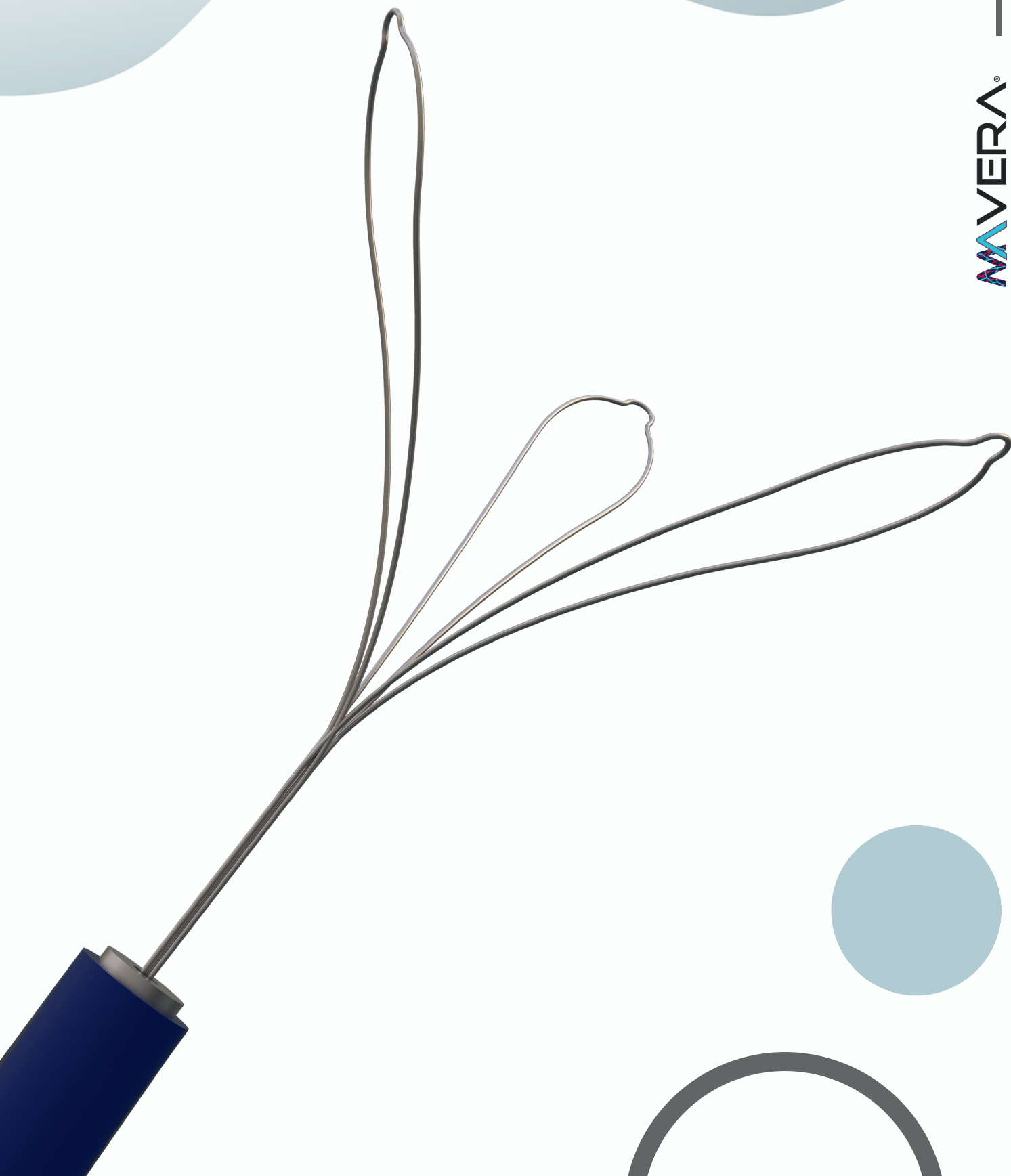

MAVERA®
ENDOVASCULAR

Sidereal™ SiderealPeriferik Vasküler SnareKateter, distal olarak bir tel üzerine monte edilmiş bir iç çalışma halkasına sahiptir. SiderealPeriferikVasküler SnareKateter damar sisteminin içindeyken, halkalar genişler ve yabancı maddeyi bir ağ gibi yakalar.

Vena kava filtresi veya periferik damar sistemlerindeki yanlış yerleştirilmiş stent gibi yabancı cisimleri çıkarmak ve manipüle etmek için kullanılır.

Sidereal Periferik Vasküler Snare, her iki cinsiyetten, 18 yaş ve üzeri yetişkinlere yöneliktir. Bu rapor kapsamında pediatrik hastalar ve hamile kadınlar için herhangi bir klinik çalışma sunulmamış ve danışılmamıştır. Bu ürünler, pediatrik hastalarda, hamile kadınlarda ve engelli kişilerde doğrudan kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

Sidereal™ Periferik Vasküler Snare, tek, iki veya üç geçiş seçeneği sunan, telli, süper elastik Nitinolden yapılmış önceden oluşturulmuş halkalardan oluşur. Süper elastik Nitinol yapısı, halkaların cihaz deformasyonu riski olmadan kateterlere yerleştirilmesine olanak tanır.

Merkez

Kateterin proksimal ucu, dişi Luer konik uçlu bir konnektör içeren kalıplanmış, kanatlı bir göbeğe sahiptir.

Göbek, doktorun kateteri herhangi bir tüp veya manifolda manuel olarak takıp çıkarabilmesi için ergonomik olarak şekillendirilmiştir.

Kateter Ucu


Kateterin ucu, damar anatomilerine uyum sağlayacak şekilde düz ve kavisli şekillerde gelir. Uç malzemesi yumuşak bir yapıya sahiptir ve işlemin tüm aşamalarında damar duvarını sınırlamak için yuvarlatılmıştır.

Gerilim Giderici

Göbek tertibatının gerilim azaltma kısmı, göbek bileşeninin üst üste binen bir parçasıdır. Maver logo, French ölçüsü, kateter uzunluğu ve kılavuz tel boyutu, göbeğin üzerindeki kısımda açıkça basılmıştır.

Kateter Şaftı

Kateter şaftı, işlem boyunca sertlik ve torkta önemli bir değişiklik olmadan yerinde kalabilen, bükülmeye dayanıklı, radyopak bir malzemeden üretilmiştir. Şaftlar şu anda tel örgülü ve tel örgüsüz konfigürasyonlarda sunulmaktadır.

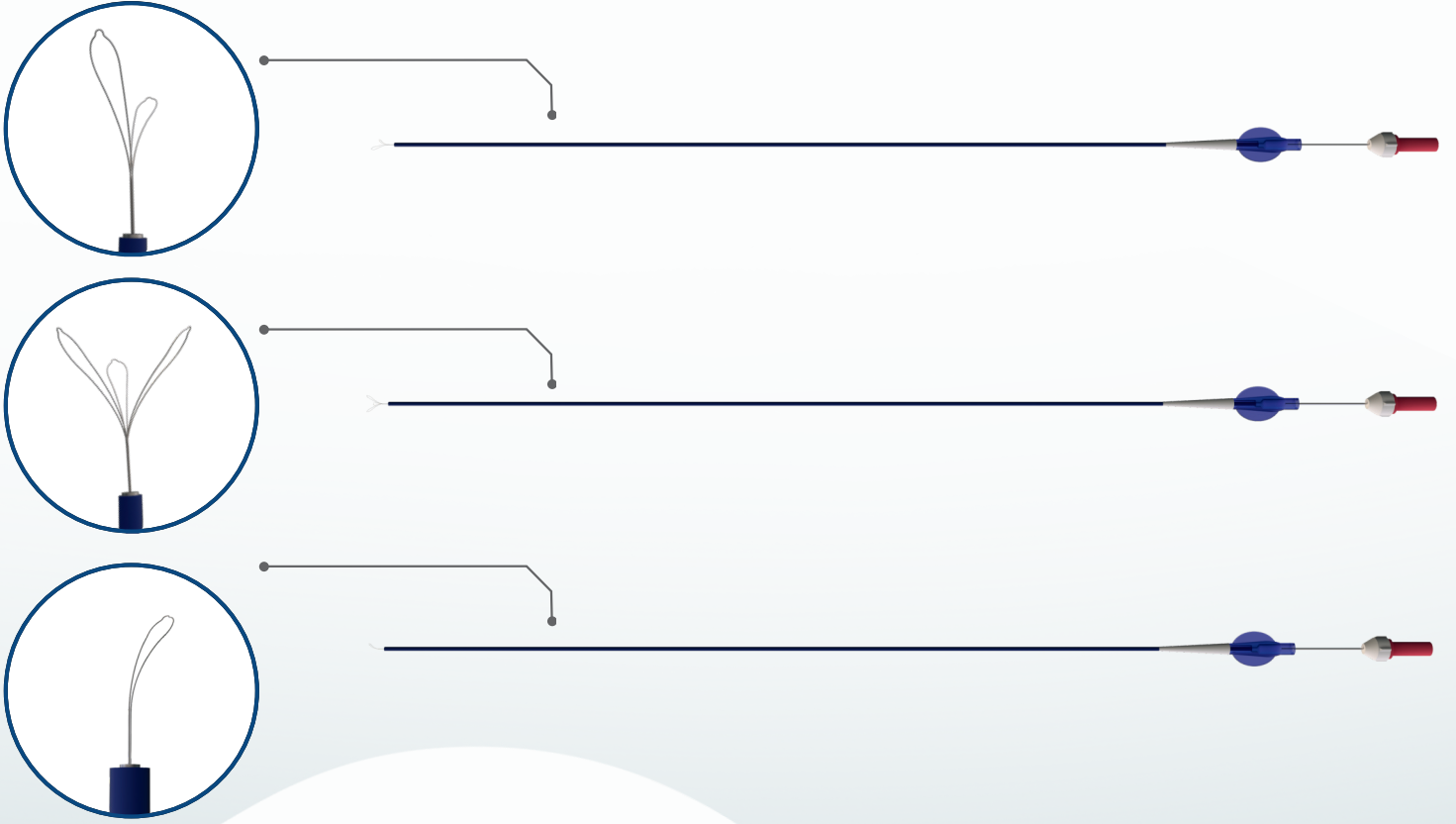


Mevcut Ölçüler
5/6/7/8/9 Fr x 125/175 cm

Endikasyonlar

Periferik damarlarda bulunan vena kava filtresi veya yanlış yerleştirilmiş stent gibi yabancı cisimleri çıkarmak ve manipüle etmek.

Kontredikasyonlar

- Bu sistem, hekimin tıbbi değerlendirmesine göre hastanın durumunu tehlikeye atabilecek bir işlem olduğunda kontrendikedir.
- Hastanın herhangi bir fiziksel rahatsızlığının bu cihazın kullanımına kontrendike olup olmadığını belirlemek hekimin sorumluluğundadır.
- Periferik damar genişlemesi amacıyla tasarlanmamıştır.
- İnferior vena kava filtresi gibi damar filtresi olmayan hastalarda.
- Bu sistem kan veya kan ürünlerinin infüzyonu için tasarlanmamıştır.
- Lezyona kılavuz tel ile ulaşılamayan hastalarda.
- Kesici/kesici balonlar, pediatrik, yenidoğan ve nörovasküler hastalarda kullanımı kontrendikedir.

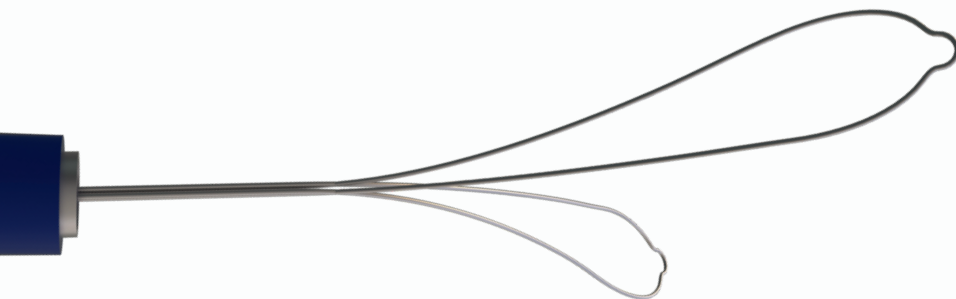



SIDEREAL™
PERIPHERAL VASCULAR SNARE

Bir cerrah, belirli bir hastayı tedavi ederken, belirli bir ürünü kullanıp kullanmayacağına karar verirken her zaman kendi profesyonel klinik muhakemesine güvenmelidir. Maver Medical Devices A.Ş. tıbbi tavsiye vermez ve cerrahlara herhangi bir ürünün ameliyatta kullanmadan önce kullanımı konusunda eğitim almalarını tavsiye eder. Bir cerrah herhangi bir Maver Medical Devices A.Ş. ürününü kullanmadan önce her zaman prospektüs, ürün etiketi ve/veya kullanım talimatlarına bakmalıdır. Yerel mevzuat ve/veya tıbbi uygulamalar nedeniyle ürünler her zaman benzer kapasitede tüm pazarlarda bulunmayabilir. Maver Medical Devices ürünleri ile ilgili sorularınız varsa bir Maver Medical Devices temsilcisi ile iletişime geçmeniz tavsiye edilir.

SiderealMaver Medical Devices Tıbbi Cihazlar A.Ş.'nin Tescilli Ticari Markasıdır. Maver Medical Devices A.Ş., ürünlerin EN ISO 13485 sertifikalı kalite yönetimi uygulanarak, en uygun son teknoloji prosesleri kullanılarak ve güvenliği tasarımına ve üretimine entegre etme ilkesini uygulayarak tasarlandığını, üretildiğini ve paketlenildiğini garanti eder. Bu sistem, kullanım kılavuzunda ve/veya kullanım talimatlarında açıklanan önlemlere uygun olarak, uygun koşul altında ve kullanım amacına uygun olarak kullanıldığında cihazın güvenli kullanımını ve tamamen ortadan kaldırılamasa da cihazla ilişkili riskleri mümkün olduğu kadar en aza indirmeyi garanti edecek şekilde tasarlanmıştır. Cihaz, bu kullanım talimatlarının diğer bölümlerinde atıfta bulunulanlar da dahil olmak üzere, tasarlanmış olduğu tedavinin kaçınılmaz riskleri ve olası yan etkileri ve komplikasyonları dikkate alınarak yalnızca uzman tıbbi personelin sorumluluğu altında kullanılmalıdır.

U.S. and foreign patents pending Issue
Date Dec 2020 Copyright© 2020.
All rights reserved.
Maver Medical Devices Inc.

SDR1220-TR-REV01 Printed in TÜRKİYE

CE
2803

Maver Medical Devices Inc.

Yesilbayır Mahallesi Sagduyu Caddesi 107/C
Mamak/ Ankara-Türkiye

+90 312 341 50 27

+90 312 341 50 26

www.maveramedical.com.tr